


ご使用に際して、必ずこの取扱説明書をお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。

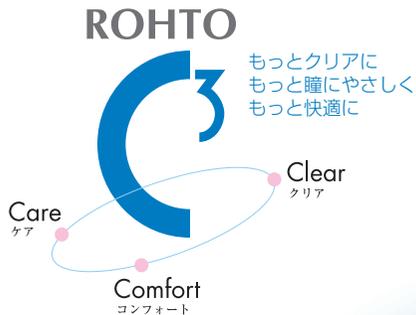

本剤はコンタクトレンズの保存・すすぎを目的とするものですが、この説明書に記載された使用方法や注意事項に従って正しく使用しないと、ケアが不十分となり、目の感染症等の原因となったり、それが進行すると視力を失う危険性も生じます。この説明書に記載された事項は必ずお守りください。現在ご使用中のコンタクトレンズの取り扱いについては、その取扱説明書もよく読み、正しい使用方法をお守りください。

ロートCキューブは、レンズへのやさしさだけでなくあなたの「瞳の健康」を追求する、トータルなコンタクトレンズ・ケアブランドです。

目の健康を支えているのは涙です。ロートCキューブベース・ソリューションは、涙成分をベースに、レンズに潤いの水ベールをつくるポロクサマーとコンドロイチン硫酸ナトリウム※を配合しました。レンズの快適さはもちろん、瞳の健康を気づかった処方設計が特徴です。

※目の健康に大切な涙の中に含まれる、アミノ酸類の一つです。

お使いになる前に

ベース・ソリューション(120mL)は完全密封容器なので、使い始めはキャップを一度強くしめて、注ぎ穴をあけてからご使用ください。

ロートCキューブ
ベース・ソリューション

保存・すすぎ液

主成分/塩化ナトリウム、ポロクサマー、
コンドロイチン硫酸ナトリウム
防腐剤無添加 120mL/300mL



あなたのベース・ソリューションの使い方は?

あなたはどの方法でレンズケアしていますか?
あなたのケア方法に最適なベース・ソリューションの使い方を下で確認し、裏面をお読みください。

ソフトレンズを煮沸ケアするタイプの方

Aのケア方法へ

★ケア★
A

O₂・ハードレンズをつけ置きケアするタイプの方

Bのケア方法へ

★ケア★
B

使用にあたってのご注意

- 安全性は確認済みですが、目の状態・個人差などにより、まれにすすぎの後、目にしみることも考えられます。通常、ご心配は不要ですが、気になる場合はCキューブお客さま安心サポートデスクにご相談ください。
- レンズの汚れは目の状態や体質等によって異なります。ご使用いただいて効果が思わしくない場合は一時使用を中止し、Cキューブお客さま安心サポートデスクにご連絡ください。
- 目薬ではありませんので、直接点眼しないでください。
- 今までにケア用剤などでアレルギー症状などが起きた方は、使用前に眼科医にご相談ください。万一、使用中に目や皮膚に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、眼科医の診療を受けてください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

Cキューブお客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに届けたい」サポートデスクです。

0120-610-492

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

万一、お使いになってご満足頂けない場合は、この商品の代金をお返します。

- お買い上げシールと外箱に不満内容を添えて、下記の住所までご郵送ください。
- 現金書留にて折り返し、代金と送料をお返します。
- お買い求めの日より、1ヶ月以内にお送りください。

使用方法と使用上のご注意

コンタクトレンズを使用していると、涙液中の成分や手指の汚れなどがレンズに付着し、正しくケアしないと見えにくさ、異物感の原因となったり、更には眼障害などが発生したり、レンズの寿命が短くなる等のおそれがあります。目の健康を守るため、また快適な装着感を保つために、必ず毎日装着後に正しいケアを行ってください。

レンズを取り扱う前には石けん等で必ず手を洗い、清潔な状態・場所でお使いください

レンズを取り出した後のレンズケースは、水道水できれいに洗い、自然乾燥させてください。

また、汚れてきたら6ヶ月程度を目安に交換してください。


★ケア★

A

ソフトレンズを煮沸ケアするタイプの方

(ベース・ソリューションとバイオドロップのペアでご使用ください。)

レンズをはずしたら

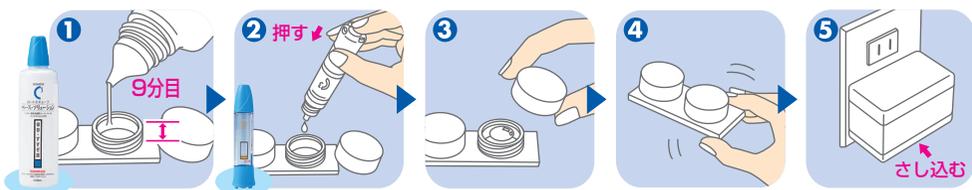

1 レンズケースにベース・ソリューションを約9分目まで入れる

2 そこにバイオドロップを1滴加える

3 レンズを目からはずしてケースに入れフタをしっかり閉める

4 中の液が混ざるように4~5回振る

5 煮沸器にセットして一晩保存

レンズをはめるとき



ベース・ソリューションで表裏とも十分にすすいでレンズ装着


★ケア★

B

O₂・ハードレンズをつけ置きケアするタイプの方

(ベース・ソリューションとバイオドロップのペアでご使用ください。)

レンズをはずしたら

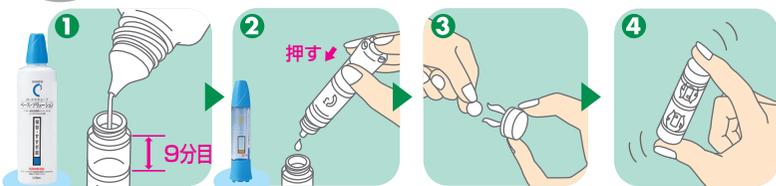

1 レンズケースにベース・ソリューションを約9分目まで入れる

2 そこにバイオドロップを1滴加える (左右つながっているケースの場合は、両眼分で2滴)

3 レンズを目からはずしてケースに入れフタをしっかり閉める

4 中の液が混ざるように4~5回振り、一晩保存

レンズをはめるとき



水道水で表裏とも充分にすすいでレンズ装着

●レンズの汚れが気になる場合

レンズの汚れには個人差があります。汚れが気になる場合には、本剤を数滴つけてこすり洗いしてください。(装着前にはすすいでください。)
「ロートCキューブレズエステ」(別売)を使用するのも効果的です。必要に応じてプラスしてご使用ください。

保管時や取扱い時には、以下のことに注意しましょう!

- 使用期限を過ぎた製品はご使用にならないでください。
- 一度使用した液は、洗浄効果がありませんので、再使用しないでください。
- 注ぎ口がレンズケースの液面や指先等に触れないようにしてください。
(雑菌等が混入し、液剤が汚染・混濁する場合があります。混濁・変質したものはご使用にならないでください。)

- 誤用・品質劣化を避けるために、他の容器に入れ替えないでください。
- O₂・ハードレンズを2日以上長期で保存する場合、上記にしたがってレンズケアをした後、レンズケースの中の液を捨て、新たにベース・ソリューションを注いで冷暗所に保存してください。
また、煮沸のできるソフトレンズの場合は、通常のケア後ベース・ソリューションでもう一度煮沸し、そのまま冷暗所に保存してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。



●使用後はキャップをしっかりしめて、直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。



温度や湿度が高くなるユニットバス内等での保管はおやめください。