

ご使用に際して、必ずこの取扱説明書をお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管してください。



本剤はコンタクトレンズのタンパク除去を目的とするものですが、この説明書に記載された使用方法や注意事項に従って正しく使用しないと、ケアが不十分となり、目の感染症等の原因となったり、それが進行すると視力を失う危険性も生じます。この説明書に記載された事項は必ずお守りください。現在ご使用中のコンタクトレンズの取り扱いについては、その取扱説明書もよく読み、正しい使用方法をお守りください。

## ロートCキューブ®は、3つのCで あなたのコンタクト生活を応援します。

ロートCキューブ®  
**バイオドロップ®**  
 タンパク分解酵素洗浄液  
 主成分/タンパク分解酵素  
 6mL



涙に含まれるタンパクはきちんと落とさないとコンタクトレンズに蓄積していきます。そして、たまればたまるほど落ちにくくなります。レンズにタンパクが蓄積すると、くもって見えにくくなったりレンズの寿命が短くなるだけでなく、目の健康にもよくありません。「ロートCキューブ®バイオドロップ」は、高純度の液体バイオ酵素を採用し、レンズをいためずしっかり洗浄することを実現しました。

### 容器の使い方

バイオドロップを出すには、容器の底を指で押してください。一滴がいつも同じ量だけ出るように設計されています。

### 使用上の注意

- レンズの汚れは目の状態や体質等によって異なります。ご使用いただいで効果が思わしくない場合は一時使用を中止し、Cキューブ®お客さま安心サポートデスクにご相談ください。
- 点眼、服用しないようご注意ください。誤って目や口に入った時は、すぐに水で洗い流し、眼科医の診察を受けてください。
- バイオドロップの主成分は安全性の高い酵素ですが、皮ふや衣類についた液は水でよく洗い流してください。
- 目や皮ふに異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、眼科医の診察を受けてください。
- 今までにケア用剤などでアレルギー症状などが起きた方は、使用前に眼科医にご相談ください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 必ずレンズをよくすすいでから装着してください。すすぎが不十分な場合、目に痛みや不快感などを感ずることがあります。

### 保管及び取扱い上の注意

- 使用期限を過ぎた製品はご使用にならないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- 一度使用した液は、洗浄効果がありませんので、再使用しないでください。
- 注ぎ口がレンズケースの液面や指先等に触れないようにしてください。
- 使用後はキャップをしっかりとめて、直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
- 誤用・品質劣化を避けるために、他の容器に入れ替えないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。



(雑菌等が混入し、液剤が汚染・混濁する場合があります。混濁・変質したものはご使用にならないでください。)



温度や湿度が高くなるユニットバス内等での保管はおやめください。

# 使用方法とご注意

コンタクトレンズを使用していると、涙液中の成分や手指の汚れなどがレンズに付着し、正しくケアしないと見えにくさ、異物感の原因となったり、更には眼障害などが発生したり、レンズの寿命が短くなる等のおそれがあります。目の健康を守るため、また快適な装用感を保つために、必ず毎日装用後に正しいケアを行ってください。

## レンズを取り扱う前には石けん等で必ず手を洗い、清潔な状態・場所でお使いください

レンズを取り出した後のレンズケースはきれいに洗い、自然乾燥させてください。

また、レンズケースは定期的新しいものに交換することをお勧めします。

汚れたレンズケースは使用しないでください。

### ★ケア★ A

#### ソフトレンズをMPS (マルチパーパスソリューション)でケアするタイプの方

(特に汚れが気になるときに、プラスケアとしてバイオドロップをご使用ください。)

##### レンズをはすしたら



1 レンズケースにMPSを約9分目まで入れる



2 そこにバイオドロップを1滴加える



3 目からはすしたレンズを手のひらにのせ、レンズの表面にMPSを数滴つけて、レンズの両面を各々、20~30回指で軽くこすり洗いをする



4 こすり洗いをしたレンズの両面をMPSで十分にすすぐ



5 すすいだレンズをレンズケースに入れ、ふたをしっかりと閉める。中の液が混ざるように4~5回振り、そのまま4時間以上つけ置きをする



MPSまたはベース・ソリューションで表裏とも十分にすすいでレンズを装着

##### レンズをはめるとき

### ★ケア★ B

#### ソフトレンズを煮沸ケアするタイプの方

(ベース・ソリューションとバイオドロップのペアでご使用ください。)

##### レンズをはすしたら



1 レンズケースにベース・ソリューションを約9分目まで入れる



2 そこにバイオドロップを1滴加える



3 レンズを目からはすてケースに入れふたをしっかりと閉める



4 中の液が混ざるように4~5回振る



5 煮沸器にセットして一晩保存



ベース・ソリューションで表裏とも十分にすすいでレンズを装着

##### レンズをはめるとき

### ★ケア★ C

#### O2・ハードレンズの方

(ベース・ソリューションとバイオドロップのペアでご使用ください。)

##### レンズをはすしたら



1 レンズケースにベース・ソリューションを約9分目まで入れる



2 そこにバイオドロップを1滴加える (左右つなごうっているケースの場合は、両眼分2滴)



3 レンズを目からはすてケースに入れふたをしっかりと閉める



4 中の液が混ざるように4~5回振り、一晩保存



水道水で表裏とも十分にすすいでレンズを装着

##### レンズをはめるとき

#### ●レンズの汚れが気になる場合

汚れには個人差があります。汚れが気になる場合には、MPS (ケアAの場合) またはベース・ソリューション (ケアB、Cの場合) を数滴つけてこすり洗いでください。(装着前にはすすいでください。)(「ロートCキュープレンスエス」(別売)を使用するのも効果的です。必要に応じてプラスして使用してください。)

表面の注意事項も必ずお読みください。

#### Cキューブお客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見、ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたにぴったりの」サポートデスクです。

0120-610-492

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

万一、お使いになってご満足頂けない場合は、この商品の代金をお返しします。

- お買の上げシールと外箱に不満内容を添えて、下記の住所までご郵送ください。
- 現金書留にて折り返し、代金と送料をお返します。
- お買い求めの日より、1ヶ月以内にお送りください。