

ご使用に際して、必ずこの取扱説明書をお読みください。また必要ときに読むよう大切に保管してください。

# ロートCキューブ® レンズエステ®

ソフト、酸素透過性ハード、ハードコンタクトレンズ用洗浄液

本剤はコンタクトレンズのごすり洗いを目的とするものですが、この説明書に記載された使用方法や注意事項に従って正しく使用しないと、ケアが不十分となり、目の感染症等の原因となったり、それが進行すると視力を失う危険性も生じます。この説明書に記載された事項は必ずお守りください。現在使用中のコンタクトレンズの取扱いについては、その取扱説明書もよく読み、正しい使用方法をお守りください。

保存・すすぎ液

タンパク分解酵素洗浄液



<ベース・ソリューション>



<バイオドロップ>



快適ごすり洗い!!



目にも、レンズにもやさしい

防腐剤・研磨剤無添加

<レンズエステ>

<レンズエステ>は<ベース・ソリューション／バイオドロップ>による毎日のつけ置き洗いを基本に、必要に応じてプラスする効果の高い洗浄液です。

コンタクトレンズ・トリートメント・システム

ROHTO



ロートCキューブ®

レンズエステ®

ごすり洗い洗浄液

レンズの汚れが気になる時、ソフトタッチのごすり洗いで、確実に落とすプラスケア。ピカピカ、すべすべの仕上がり感が快適です。

【主成分】  
非イオン  
界面活性剤  
・  
6mL(約30回分)

## 保管時や取扱い時には、以下のことに注意しましょう!


## 使用にあたってのご注意

◎ <バイオドロップ>と間違わないように注意してください。

■ <レンズエステ>は、<ベース・ソリューション> <バイオドロップ>と併用することにより、優れた洗浄効果を発揮します。必ず、3品でご使用ください。

■ ソフトレンズの煮沸消毒は毎日行なってください。煮沸消毒をしない場合、レンズに雑菌やカビなどが繁殖し使用できなくなったり、目に障害が起こる恐れがあります。

■ 使用後はキャップをしっかりと締めて、直射日光を避けてなるべく涼しいところに保管してください。

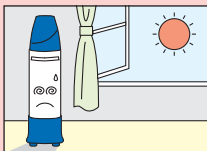

・温度や湿度が高くなるユニットバスなどは避けてください。

■ 目とレンズへのやさしさを考え防腐剤を使用していません。雑菌が入らないように清潔にお使いください。

・注ぎ口にレンズや指先などが触れないようにしてください。  
・キャップは、しっかりと締めてください。  
・誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。

○安全性の高い成分を使用していますが、点眼や内服に適するものではありませんのでご注意ください。また、幼児の手が届かない所に保管してください。

○衣類などに液がついた場合は、水道水でよく洗い流してください。  
○使用期限を過ぎた製品はご使用にならないでください。

## コンタクトレンズ取扱い上の注意

○コンタクトレンズは、破損、紛失しやすいデリケートな医療機器です。お取扱いの際は以下の点にご注意ください。

- ・レンズを取扱う際にはよく手を洗い、清潔な状態、場所で行なってください。
- ・爪やレンズケースの角などでレンズを傷つけないようにしてください。
- ・レンズに強い力を加えないようにしてください。
- ・レンズに化粧品、薬品などの異物をつけないでください。
- ・洗面台などでレンズを取扱う場合は、レンズが流れてしまわないように必ず排水口に栓をしてください。

○レンズの汚れは、目の状態や体質によって異なります。<レンズエステ>をご使用いただいても効果が思わしくない場合は、一時使用を中止し、Cキューブお客様さま安心サポートデスクにご相談ください。

○毎日、レンズを快適かつ安全に装着するために、異常がなくても眼科医から指示された定期検診を受けてください。

## Cキューブお客様さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに聴きたい」サポートデスクです。

0120-610-492 受付時間9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

万一、お使いになってご満足頂けない場合は、この商品の代金をお返します。

- お買い上げシートと外箱に不満内容を添えて、下記の住所までご郵送ください。
- 現金書留にて折り返し、代金と送料をお返します。
- お買い求めの日より、1ヶ月以内にお送りください。



ロート製薬株式会社  
〒544-8666 大阪府生野区美西1-8-1

改訂:2008年12月

## 使用方法と使用上のご注意

コンタクトレンズを使用していると、涙液中の成分や手指の汚れなどがレンズに付着し、正しくケアしないと見えにくさ、異物感の原因となったり、更には眼障害などが発生したり、レンズの寿命が短くなる等のおそれがあります。目の健康を守るため、また快適な装着感を保つために、必ず毎日装着後に正しいケアを行なってください。

## レンズを取扱う前には必ず手を洗い、清潔な状態・場所でお使いください

レンズを取り出した後のレンズケースは、水道水できれいに洗い、自然乾燥させてください。また、汚れてきたら6ヶ月程度を目安に交換してください。

### ご使用の手順

長時間の装着などで、いつもよりレンズが汚れていると思える時

**LOOK** **A** 夜のレンズケアに〈レンズエステ〉をプラスしてください。

朝、レンズをはめた時や日中に、レンズのくもりが気になった時

**LOOK** **B** レンズを一旦はずして〈レンズエステ〉をご使用ください。

★〈ベース・ソリューション〉〈バイオドロップ〉の詳しいご使用方法は、それぞれの製品に添付されている取扱説明書をお読みください。

## ロートCキューブ〈レンズエステ〉の使用方法

まず、手を石鹸でよく洗い、水道水できれいにすすいでください。

**!** 汚れている手や指でレンズを取扱うと、レンズに汚れが付着し装着感が悪くなる場合があります。こすり洗いの際には、特に指先や手のひらに汚れが残らないように丁寧に洗ってください。

### O<sub>2</sub>・ハードの場合

レンズを目からはずして指先にのせ、レンズの上に〈レンズエステ〉を2～3滴落としてください。



**!** 容器の底を指の腹で軽く押しで1滴ずつ出してください。

親指・人差し指・中指の3本の指で、レンズ全体を表裏とも20回回していねいにこすってください。



### ソフトの場合

レンズを目からはずして手のひらにのせ、レンズの上に〈レンズエステ〉を2～3滴落としてください。



レンズを人差し指の腹で押さえ、指を動かしてレンズ全体を表裏とも20回回していねいにこすってください。



**!** ○爪がレンズに触れるとレンズが傷ついたり、破れたりすることがありますのでご注意ください。

○また、レンズに強い力を加えたり、折り曲げたり、ねじ曲げたりすると破損する場合がありますのでご注意ください。

○特に、ソフトレンズは乾燥するとろろくなって破損しやすくなりますので、こすり洗いの時にはいつもレンズがぬれていることをご確認ください。

## A 夜のレンズケアにプラスする場合

**1** レンズケースの一方に、〈ベース・ソリューション〉を約9分目まで入れてください。

**2** そこに、〈バイオドロップ〉を1滴だけ加えてください。

**3** **ここで〈レンズエステ〉!**  
(左記の使用方法をご参照ください)



**4** 〈ベース・ソリューション〉で、レンズの表裏ともに十分にすすいでください。

**5** レンズをケースに入れ、レンズ全体が調製液の中につかっていることを確認してから、キャップをしっかり閉めてください。

**6** もう一方のレンズも(1)～(5)まで同様の処理を行なってください。

**7** 中の液がよく混ざるよう、レンズケースを軽く4～5回振って、1晩保存。  
装着前に、O<sub>2</sub>・ハードレンズは水道水で、ソフトレンズは〈ベース・ソリューション〉で、レンズの表裏ともに十分すすいでください。

## B レンズを一旦はずしてお手入れする場合

**1** **まず〈レンズエステ〉!**  
(左記の使用方法をご参照ください)



**2** O<sub>2</sub>・ハードレンズは水道水で、ソフトレンズは〈ベース・ソリューション〉で、レンズの表裏ともに十分すすいでください。