

● ご使用に際して、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。●



本剤は酸素透過性ハード・ハードコンタクトレンズの洗浄・保存・タンパク除去を目的とするものですが、この説明書に記載された使用方法や注意事項に従って正しく使用しないと、ケアが不完全となり、目の感染症等の原因となったり、それが進行すると視力を失う危険性も生じます。この説明書に記載された事項は必ずお守りください。現在ご使用中のコンタクトレンズの取り扱いについては、その取扱説明書もよく読み、正しい使用方法をお守りください。

ロートCキューブ オーツワン® 酸素透過性ハード・ハードコンタクトレンズ専用強力酵素洗浄保存液
主成分/タンパク分解酵素・陰イオン界面活性剤

実感、レンズピカピカで快適! 使い終わるまで続く強力洗浄パワー!

タンパク分解酵素は、脂質溶解成分と混ぜることで効果を発揮し始めますが、混ぜた状態で長く置いておくと、どうしても洗浄力が徐々に落ちてしまいます。そこで、オーツワンは洗浄力を活かすための、オリジナルボトルを採用!

オーツワンオリジナル! 強力洗浄パワーが続くボトルの特徴

オーツワンは、開栓時に初めてタンパク分解酵素と脂質溶解成分を混ぜ合わせるボトルを採用。だから、酵素のフレッシュで強力な洗浄パワーが発揮! それが約1ヵ月間使い終わるまで持続します。レンズピカピカ、毎日快適! ぜひ実感してください。



使用方法

ご購入後、最初にロートCキューブ <O₂・One> をお使いになる前に…

1

容器上部のフィルムを取り外し、矢印の方向にカチッと音がするまで回してください。

- 容器は振らないでください。
- 回すだけで上下の成分が混ぜられます。
- 振ると泡立ち、液が飛び出る場合がありますので、ご注意ください。



2

容器上部を回した後、振らずに、ゆっくりとキャップを開けてください。

- キャップを開けると、中の空気が「プシュ」と抜けます。
- 強い洗浄力を維持するために、本品は一度開封した後、約1ヵ月を目安にお使いください。



●レンズを取り扱う前には石けん等で必ず手を洗い清潔な状態・場所でお使いください。●



夜、レンズをはさず時…

1

レンズケースを<O₂・One>で満たしてください。

① ラップ状の注ぎ口をイラスト図のように、レンズケースのふちに添わせてください。こぼれにくく、液切れのよい注入ができます。

2

レンズを目からはずして、レンズホルダーに入れてください。

3

レンズをホルダーごとケースに収納してください。

① レンズ全体が<O₂・One>に充分浸っていることを確認してください。

4

もう一方のレンズも1~3までの同様の処理を行ってください。

一晩保存
つけておくと汚れをレンズから浮き上がらせるので、つけておく時間が長いほど効果がアップします。



朝、レンズをはめる時…

1

レンズケースからレンズを取り出し、水道水でレンズをやさしくなでるようにして、表裏ともぬめりが取れるまでよくすすいでから装着してください。

① ●すすぎの足りない場合、レンズ装着時に刺激や痛みを感じる場合がありますのでご注意ください。

●勢いよく水道水を出すと、レンズを流してしまい紛失する恐れがあります。必ず、排水口に栓をしてからすすいでください。

2

レンズケースの中の液を捨て、ケースとホルダーを水道水できれいに洗い、水をよく切ってください。

① ●コンタクトレンズをいつも清潔に保つため、液は毎回交換してください。

●手についた洗浄液は、きれいに洗い流してください。

●レンズの汚れが気になる場合
レンズの汚れは個人差があります。汚れが気になる時には本剤を数滴つけてこすり洗いしてください。(装着前にはすすいでください。)

●コンタクトレンズを2日以上長期保存する場合●

- (1) 使ったレンズを使用法の1～4にしたがってケアして、一晩保存してください。
- (2) レンズケースからレンズを取り出して水道水でよくすすいでください。
- (3) レンズケースを水道水できれいに洗った後、〈O₂・One〉を注ぎ、レンズを入れてください。
- (4) レンズケースのふたをしめて、冷暗所に保存してください。

レンズを装着しない期間が1週間を超える場合にも、その間週1回〈O₂・One〉の交換を行うことをおすすめします。また、1ヵ月以上レンズを装着していなかった場合は、眼科医を受診の上レンズを装着するようにしてください。

こんな
使い方も…


- クイック洗浄…装着中、レンズのくもりが気になる時は、レンズを目からはずし、本品を2～3滴付けて軽くこすり洗った後、水道水でよくすすいでください。素早く洗浄できます。
① 毎日のつけ置き洗いは必ず行ってください。
- 一時保存…一時的にレンズを目からはずした時の保存液としてもお使いいただけます。

ご 注 意

装着したコンタクトレンズには、涙液中のタンパク質や脂質などが付着しています。これらの汚れを放っておくと、装着感や見え方が悪くなるだけでなく、眼障害の原因になることもあります。これらを防ぐため、コンタクトレンズのケアは大切です。

- ソフトレンズには絶対にご使用にならないでください。
- 初回開栓時、容器は振らないでください。
(振ると泡立ち、液が飛び出る場合があります。)
- 装着前には必ず水道水でレンズを充分すすいでください。
- 使用後は品質保持のため、キャップをしっかり閉めてください。
- 使用期限を過ぎた製品はご使用にならないでください。
- 一度レンズを浸けた液には洗浄効果がありませんので再使用できません。
- 強い洗浄力を維持するために、本品は一度開封した後、約1ヵ月を目安にお使いください。
- 本品は直射日光を避け、必ず常温(15～25℃)で保存してください。

特に、冷蔵庫や冷凍庫のような冷たすぎる場所やユニットバス内のような温度や湿度の高すぎる場所は避けてください。
低温環境下に保管した場合、白濁したり、酵素が十分な効力を発揮できなくなることがあります。必ず常温でご使用ください。

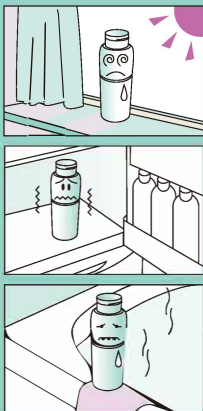

- 容器の先に触れますと、雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますのでご注意ください。また混濁・変質したものはご使用にならないでください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因となったり品質が変わる)
- レンズを取り出した後のレンズケースは、水道水できれいに洗い、水をよく切って自然乾燥させてください。また、6ヵ月程度を目安に交換してください。
- 小児の手の届かない場所に置いてください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 点眼、服用しないように、また皮膚につかないようにご注意ください。誤って目や口に入った時、皮膚についた時は、すぐに水で洗い流し、異常を感じた場合は、医師の診療を受けてください。
- 本品は強力な酵素洗浄保存液ですので、皮膚や衣類についた液は水でよく洗い流してください。
- 使用中、万一、目や皮膚に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し医師の診療を受けてください。
- 今までにケア用品などによってアレルギー症状などが起きた方は使用前に眼科医に相談してください。

Cキューブお客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

0120-610-492

受付時間9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

万一、お使いになってご満足いただけない場合は、この商品の代金をお返しします。

- 不満内容・住所・氏名・電話番号を明記の上、お買い上げレシートと外箱をCキューブお客さま安心サポートデスク(下記の住所)までご郵送ください。
- 現金書留にて、代金と送料をお返します。
- お買い求めの日より、1ヵ月以内にお送りください。

ROHTO ロート製薬株式会社
〒544-8666 大阪市生野区巽西1-8-1

改訂：2016年3月

401345802