

添付文書

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2023年 12月作成
一般用検査薬
第1類医薬品


排卵日予測検査薬 一般用黄体形成ホルモンキット **ドゥーテスト® LH排卵日予測検査薬スティックタイプ**

排卵日を事前に把握することの重要性

妊娠は卵子と精子が互いに生存している時期に出会うことから始まります。女性の体内での精子の生存期間が約2~3日であるのに対し、卵子は排卵後、約24時間しか生存しないといわれています。従って、排卵の前又は直後の性交が最も妊娠しやすく、妊娠を望む上で排卵日を事前に把握することはとても大切なことです。

排卵日がわかるしくみ(測定原理)

黄体形成ホルモン(LH)は、女性ホルモンの一種で、普段から少量分泌されています。生理(月経)周期の中頃に短期間ですが、このLHの分泌量が急激に増加します。このLHの大量分泌をLHサージといい、LHサージから約40時間以内に排卵がおこるといわれています。「ドゥーテストLH排卵日予測検査薬 スティックタイプ」は尿中に分泌されるLHを検出し、LHサージをとらえるための検査薬です。排卵を予測するための方法の一つとして基礎体温が知られていますが、基礎体温と併せて検査を行うと、より排卵日の予測の補助として有用です。この検査薬は、LHサージを検出するもので、排卵を確認するわけではありません。6周期検査し、適切な時期に性交しても妊娠しない場合は、医師の診療を受けてください。

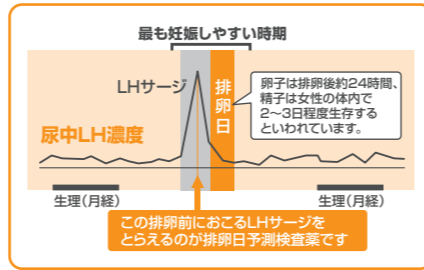

使用上の注意

❌してはいけないこと 本品は、避妊目的に設計されており検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊の目的で用いてはいけません。(本品は、排卵日予測の補助を目的とした検査薬であり避妊目的には使用できません。)性能上確実に排卵日を特定できるわけではありません。避妊法(経口避妊薬の服用等)を行っている人は検査を行わないでください。

相談すること

- ①次の人は、使用前に医師に相談してください。
 - ・不妊治療を受けている人
 - ・通常の性交を継続的に行っても1年以上妊娠しない人
 - ・生理(月経)周期が極端に不順又は経血量が異常など月経異常がある人
- ②検査期間中、陰性が続きLHサージが確認できない場合は、早期に医師、薬剤師に相談してください。
- ③この説明書の記載内容で分かりにくいところがある場合は、医師、薬剤師に相談してください。

検査時期に関する注意

- ・1日1回検査をする場合:1日1回毎日ほぼ同じ時間帯に検査してください。
- ・1日2回検査をする場合:1日2回(例えば朝夕)検査をしてください。毎日ほぼ同じ時間帯に検査してください。

廃棄に関する注意

廃棄の際は尿の付着したもの、あるいはプラスチックゴミとして各自自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

使用目的

尿中の黄体形成ホルモン(LH)の検出(排卵日予測の補助)

使用方法

検査のタイミング ご自分の生理(月経)周期から換算して、次の生理(月経)開始予定日の17日前から検査を開始してください。



月経周期	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	32日	33日	34日	35日	36日	37日	38日	39日	40日
検査を始める日	5日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日

上の表について、生理(月経)開始日の翌日を1日目として、検査開始日を決めてください。生理(月経)周期が不規則な方は最近の2~3周期の中で一番短かった周期を目安にして、次回生理(月経)開始予定日を決めてください。

検査のしかた 検査開始日から、1日1回、毎日ほぼ同じ時間帯に検査をしてください。

検査の手順

(過去に検査をしてLHサージがうまく確認できなかった場合や、今回検査をしたところ陽性が陰性かの判定に迷う場合などには、1日2回検査を行うことで、よりLHサージをとらえやすくなります。)

1 キャップを後ろにつける

2 尿を2秒かける ※5秒以上かけないでください。
 ※紙コップ等を使用する場合は乾いた清潔なものを用い、採尿部全体が浸るように2秒つけてください。
 5秒以上はつけてください。


3 キャップをして、平らな所に置いて5分待つ
 ※テストスティックは傾けず、水平なところに置いてください。
 ※10分を過ぎての判定は避けてください。

判定のしかた

Step 1

尿量確認ラインがきちんと出ているか確認しましょう。

※尿量確認ラインが出ていない場合は、正しく検査が行われていない可能性がありますので、別のテストスティックで再検査してください。

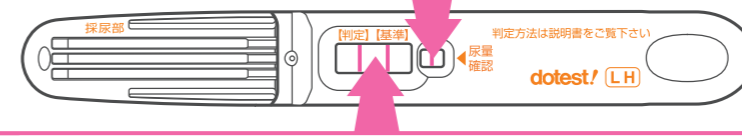

Step 2

判定窓の【判定】ラインと【基準】ラインの濃さを見比べて、陽性・陰性を判定してください。

※検査キットの判定部を以下のように判定してください。初めて陽性になったとき、LHサージが検出されたということであり、間もなく排卵がおこるといえるしです。

陽性

【基準】ラインに比べて、【判定】ラインが濃い、もしくは同等の濃さのとき。



陽性が出たら
 LHサージが検出されました。間もなく排卵がおこると予測されます。初めて陽性になった日か、その翌日が最も妊娠しやすい時期(排卵日)です。

陰性

【基準】ラインに比べて、【判定】ラインが薄い、もしくは出ないとき。



陰性が出たら
 LHサージが検出されませんでした。翌日以降もほぼ同じ時間帯に陽性になるまで検査を続けてください。

再検査

尿量確認ラインと【基準】ラインの少なくとも一方が出ないとき。その場合は新しいテストスティックを用いて、再検査してください。



※未開封のテストスティックは次回以降の検査に使用してください。(ただし、使用期限内にお使いください。)

使用に際して、次のことに注意してください。

採尿に関する注意

●にごりのひどい尿や異物がまじった尿は、使用しないでください。●検査前4時間程度はできるだけ排尿しないでください。●検査前、水分を過剰にとらないでください。●検査前、大量の発汗を伴う運動は避けてください。

検査手順に関する注意

●採尿後は、速やかに検査を行ってください。尿を長く放置すると検査結果が変わることがあります。●操作は、定められた手順に従って正しく行ってください。

判定に関する注意

- ①検査初日から陽性になった場合
 既に排卵された可能性があります。妊娠を望む場合は、できるだけ早く性交することで、妊娠の可能性が高まります。また、陰性になることが確認できるまで検査を続けてください。(確認できない場合は、③を見てください。)
- ②検査期間中、陰性が続く場合
 早期に医師、薬剤師に相談してください。通常、排卵期に、本品を使用すると陽性となりますが、女性の内分泌的背景、例えば不規則な生理(月経)周期、短期LHサージ(12時間以内)などの原因で、まれに陽性とならないことがあります。
- ③検査期間中、陽性が続く場合
 早期に医師の診療を受けてください。妊娠、分娩後、流産後、胎状奇胎・絨毛癌等の絨毛性疾患、人工妊娠中絶後、あるいは不妊治療のための薬剤投与、内分泌障害、閉経期などでは、排卵と無関係に、陽性が続く場合があります。
- ④検査をし、その都度陽性を確認した上で適切な時期に性交しても6周期以上妊娠しない場合
 妊娠しにくい原因は排卵に関する問題だけではなく、できればパートナーと一緒に医師に相談してください。ただし30歳代後半以上の方、結婚後妊娠できない期間が長い方、早期の妊娠をご希望の方は早めに受診することをお勧めします。

キットの内容・成分・分量・検出感度

【内容】テストスティック 1本中
 【成分・分量】
 金コロイド標識抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体(マウス)・・・3.68μg
 抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体(マウス)・・・0.49μg
 抗マウスIgG・ポリクローナル抗体(ウサギ)・・・0.49μg
 【検出感度】30mIU/mL

保管及び取り扱い上の注意

●小児の手の届かない所に保管してください。●直射日光を避け、湿気の少ない所に保管してください(1~30℃)。●冷蔵庫内に保管しないでください。冷蔵庫への出し入れにより結露を生じ、検査結果に影響を与えるおそれがあります。●品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。●使用直前に開封してください。●使用期限の過ぎたものは使用しないでください。

検査結果

検査結果を記入してみましょう。

検査日数	検査日	検査時間	検査結果	その他・メモ
記入例	1月10日	AM8:30	陽性・陰性	判定に線なし。
1日目			陽性・陰性	
2日目			陽性・陰性	
3日目			陽性・陰性	
4日目			陽性・陰性	
5日目			陽性・陰性	
6日目			陽性・陰性	
7日目			陽性・陰性	
8日目			陽性・陰性	
9日目			陽性・陰性	
10日目			陽性・陰性	
11日目			陽性・陰性	
12日目			陽性・陰性	

排卵から約2週間後に、生理(月経)は始まります。LHサージをとらえるために、次回生理(月経)開始予定日の17日前から検査を開始すると、生理(月経)予定にずれが生じない典型的な例では、検査開始から約3日目に初めて陽性が現れます。(検査結果には個人差があります。また、あくまで典型的な例であり、異常がなくてもずれる場合があります。)

保管方法・有効期間

室温保存 27ヶ月間
 (使用期限は外箱およびテストスティックの袋に記載)

包装単位

5回分、10回分

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
 女性スタッフが丁寧にお応えします。

ドゥーテストLH相談室
 コミュニケーションコール(お客様相談室) 受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝除く)
0120-373-610

ロート製薬株式会社
 〒544-8666 大阪市生野区巽西1-8-1