

基準についての考え方

WHOマニュアル2021による正常下限値

精液量	1.4mL
総精子数	3,900万
精子濃度	1,600万/mL
総運動率 (前進+非前進)	42%
前進運動率	30%
生存精子率	54%
正常率	4%

このキットは、WHOの精液検査の基準値のうち、精子濃度・運動率をもとに算出した運動精子濃度をテストするキットです。
WHO基準値のうち、精子濃度1,600万/mL及び運動率42%から換算した運動精子濃度672万/mLを下限値として、あなたの精子を簡易的にテストします。

本結果はWHOの基準値を元に算出したものであり、あなたの精子の受精能力を判断するものではありません。

ご使用上の注意

ご使用前に必ずお読みください。

- スマートフォンの画面が暗いとき又は逆に明るすぎて白抜けするときは、照明からの距離、角度をご調整ください。
- 光の量が適切でないと、正確な計測ができないことがあります。
- ピントが合いづらいときは、一旦ネジ部を完全に閉め(顕微鏡を上からみたととき時計回りの方向にまわしていきます)、そこから僅かにネジ部を緩めるようにしてください。
- 精液を試料台に附着させるとき、所定位置以外に附着しないようご注意ください。もし顕微鏡のレンズに附着した場合は、少し濡らせた布などで拭き取ってください。
- 測定中は、スマートフォンや顕微鏡を動かさないようお願いします。振動が加わったり、光の入り具合が不安定ですと、測定結果に影響を及ぼすおそれがあります。
- 本製品は2回分になります。1回のセット内容は、再利用できませんので、ご使用後は、市町村の区分に従って廃棄してください。
- 顕微鏡にほこりや汚れがつかないように、使用後は袋に入れて保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 記載事項をよくお読みの上ご使用ください。不適切な使用、用途外使用等による事故又は損害等に関しては当社は責任を負いかねます。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

お気軽にお問い合わせください。専用スタッフが丁寧にお応えします。

0120-610-315

受付時間 9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

ローテック株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1

!dotest[®] いのち、よろこび

スマートフォン用 運動精子濃度テストキット

事前にお読みください

ローテック株式会社

はじめに

以下の製品が同梱されているかをご確認ください。

・顕微鏡



×1

・本事前説明書



×1

・採取カップ



・採取スティック



・滑り止めシート



・試料台



×2

・男性のための
ふたり妊活読本



×1

本キットについて

本製品は、アプリをインストールしていただくことで、テストを実施いただけるものです。
必ずアプリをインストールしてください。

本製品のアプリのインストールはこちらから。




iPhone及びAndroid対応

ドゥーテストのホームページ



本キットの流れ

<簡単なステップ>

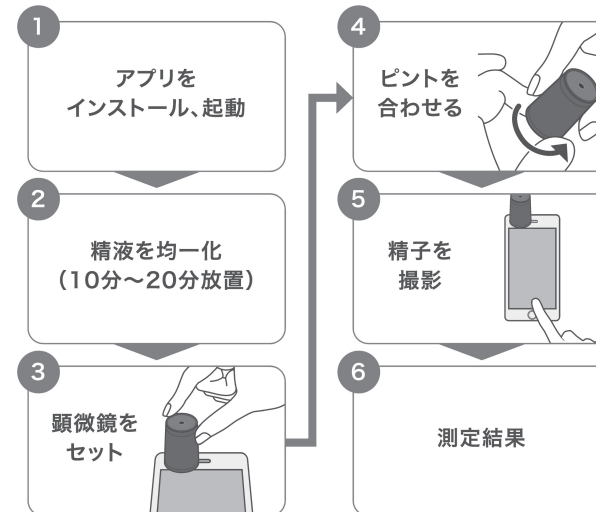

WHOの基準から算出した下限値と比較します。