

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

ROHTO

指定医薬部外品



コンタクトレンズ 装着薬

ロートCキューブ®モイスクッション®d

特 長

■「ロートCキューブ モイスクッションd」は、レンズに直接うるおいを与えることで装着を容易にし、瞳に心地よい快適な装着感を実現しました。

1. レンズと瞳の間にクッション作用

レンズと瞳の間に作用するうるおいのクッションが、ゴロゴロ感などの異物感を抑えて装着を容易にし、ふんわりとしたフィット感を実現しました。

また、ヒアルロン酸Na(製剤の粘稠剤)を配合しています。

2. 気持ちよい装着感

ベタつきにくく、瞳に心地よいクールなつけ心地です。

3. レンズのくもりを防止

タンパクなどからレンズを守るうるおいペールが、装着時にレンズのくもりを防ぐからクリアで快適です。

4. すべてのコンタクトレンズにOK!

ソフト・ハード・O₂・使い捨て、すべてのコンタクトレンズに使用できます。



自由な角度で使用できる
フリーアングルノズル®



レンズに直接液を落としやすい

ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

△ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人 … はげしい目の痛み

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。特に、アレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意してご使用ください。

効能・効果

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易にする。

用法・用量

コンタクトレンズの両面を1回1～3滴でぬらしたのち装着してください。

(用法・用量に関する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をコンタクトレンズ、指に触れさせないでください。(汚染や異物混入の原因となる)
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。



成分

有効成分	配合量
ポリビニルアルコール(部分けん化物)	1%
塩化ナトリウム	0.44%

添加物:塩化K、リン酸水素Na、リン酸二水素Na、ヒプロメロース、ヒアルロン酸Na、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エデト酸Na、塩酸ポリヘキサニド、*l*-メントール、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

※薬液に粘性をもたせております。そのため、装着後しばらく視野がぼやけることがありますのでご注意ください。

[コンタクトレンズご使用の際の注意]

- *コンタクトレンズを取り扱う前に、よく手を洗い清潔にしてください。
- *コンタクトレンズを清潔に、また、清浄に保つために保存、洗浄については十分心がけてください。
- *コンタクトレンズご使用中の方は、眼科医による定期検査を必ずお受けください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間9:00～18:00(土、日、祝日を除く)