

機械器具55 医療用洗浄器 一般医療機器 鼻用洗浄器 JMDNコード41599000

アルガード® 鼻すっきり洗浄液™

⚠ 禁忌・禁止

- (1) 鼻の炎症のひどいときは使用を避けてください。
- (2) 鼻腔内の洗浄にのみ使用し、目や耳に使用しないでください。

操作方法又は使用方法等

- (1) カバーキャップをはずして、図のようにノズルボタンに指のはらをのせます。
- (2) ノズルの先を鼻腔にそっと入れて噴霧してください。
- (3) もう一方の鼻腔も同様に洗浄します。使用后、軽く鼻をかんでください。
- (4) ノズルの先をティッシュなどでふき取り、カバーキャップをして清潔に保管してください。



<使用方法に関連する使用上の注意>

容器は振らないでください。また、あまり傾けたり、横にしたり、逆さにして使用しないでください。(ガスが抜け最後まで使用できなくなる)

使用上の注意

- (1) 耳鼻咽喉科で治療を受けている方は、使用前に医師に相談してください。
- (2) 使用中に万一異常が生じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 洋服などが濡れないようにご注意ください。
- (5) 洗面所などでの使用をおすすめします。
- (6) 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押して、ガスを抜いてください。

貯蔵・保管方法

- (1) 直射日光の当たる場所やファンヒーターなどの暖房器具の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
- (2) 小児の手の届かない場所に保管してください。

包装

1本 100mL

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

製造販売元 小池化学株式会社 埼玉県鴻巣市袋882
048-548-2111

製造元 小池化学株式会社

発売元 **ロート製薬株式会社** 大阪市生野区巽西1丁目8番1号

お問い合わせ先:ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)