

アルガード®

鼻すっきり洗浄液™

<使用目的又は効果>
鼻腔洗浄

ご使用方法

1 キャップを外す

カバーキャップを外して、図のようにノズルボタンに指の腹をのせます。



2 鼻の中にスプレーする

ノズルの先を鼻の中にそっと入れて、お好みの量をスプレーしてください。図のように軽く上を向き、ティッシュなどを添えた状態でスプレーするのがおすすめです。



※洗浄液は反対の鼻や口からは出ません。
※1回1秒で約100回ご使用いただけます。

3 鼻をかむ

使用後、軽く鼻をかんでください。スプレー後、軽く上を向いたまま鼻をつまんで、洗浄液を鼻の中にしばらくとどめてから鼻をかむのがおすすめです。

4 ノズルの先をふく

ノズルの先をティッシュなどでふき取り、カバーキャップをして清潔に保管してください。

<使用方法に関連する使用上の注意>

振らない!傾けない!

容器は振らないでください。また、あまり傾けたり、横にしたり、逆さにして使用しないでください。
(ガスが抜け最後まで使用できなくなる)

<形状・構造及び原理等>

概要: 耐圧容器に洗浄液と圧縮空気を充填した製品
原理: 圧縮空気により原液を霧状に吐出させる

禁忌・禁止

- (1) 鼻の炎症のひどいときは使用を避けてください。
- (2) 鼻腔内の洗浄のみ使用し、目や耳に使用しないでください。

成分

精製水、塩化ナトリウム、ポリソルベート80、香料、ベンザルコニウム塩化物(保存料) 0.0035%

使用上の注意

- 耳鼻咽喉科で治療を受けている方は、使用前に医師に相談してください。
- 使用中に万一異常が生じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 洋服などが濡れないようにご注意ください。
- 洗面所などでの使用をおすすめします。
- 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押して、ガスを抜いてください。

保管方法

- 直射日光の当たる場所やファンヒーターなどの暖房器具の周囲は、温度が上がり破損する危険があるので置かないでください。
- 小児の手の届かない場所に保管してください。

高温に注意

加圧されている製品のため、下記の注意を守ること。

- ①温度が40℃以上となるとところに置かないこと。
 - ②火の中に入れないこと。
 - ③使い切って捨てること。
- 圧縮空気使用

品目届出番号 10B3X10013001001
一般医療機器
鼻用洗浄器



(01)34987241101642

ロート製薬お問合せ先
コミュニケーションコール
0120-610-755

発売元:
ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1
製造販売元:
小池化学株式会社
群馬県渋川市赤城町長井小川田6-5



アルガード®

鼻すっきり洗浄液™

持ち運べる!スリムボトル

花粉・雑菌を洗浄 鼻すっぴ スプレー

つらい鼻詰まりの元に!

※花粉・雑菌



しみないから
痛くない
ミスト
タイプ

ミントの香り

100mL

ROHTO

鼻水が奥に
詰まるとれない!

鼻をかんでも
すっきりしない!

鼻の中の花粉や
ホコリをとりたい!

鼻にしみない
から痛くない!
等張液スプレー


持ち運べる
スリムボトル



家で



オフィスで

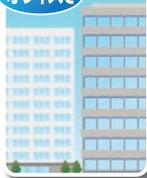

学校で



不正加工防止包装

この製品は容器を透明フィルムで
密封包装しています。

製造番号



4 987241 101641